

EWACS Öronspolare

Ear **W**ater **C**leaning **S**ystem



Lätthanterlig och effektiv

Behaglig och säker för patienten.

Ansluts till vanlig vattenledning.

Lätthanterlig; tryck bara lätt på "avtryckaren"!

Effektiv behandling genom kontinuerligt vattenflöde.

Behaglig för patienten då vattentryck och flöde är konstanta.

Säker; inställt tryck hålls stabilt av en tryckregulator.

Monteringen är lätt att göra helt utan eller med enkla verktyg.



Öronspolaren består av tryckregulator och spolpistol som ansluts med snabbkopplingar inbördes och till vattenblandare. För bästa temperaturkontroll rekommenderas anslutning till termostatblandare. Då öronspolaren inte används kan blandaren samt handfat eller diskbänk användas som vanligt.



Tryckregulatorn ger ett stabilt spoltryck och justeras lätt till önskat tryck med den svarta ratten. Trycket visas på en manometer. Ett sidoutlopp underlättar temperatur-inställning.



Spolpistolen har bekväm avtryckare och reglerventil som medger mjukstart och gör spolningen lätt att utföra. Närmast örat används ett speciellt spolmunstycke i plast. Munstycket byts mellan varje patient.



Spolmunstycket är anslutet med snabbkoppling och tillverkat i polyeten. Det tål rengöring och är miljövänligt vid engångs-användning. Spolmunstycken köps i olika förpacknings-storlekar, 10, 100, 500, alt.1000 st.



Strålsamlaren har fäste för snabb-koppling och kan placeras i vattenblandarens snabbkoppling då öronspolaren inte används. Därigenom erhålls en mjuk och stänkfri vattenstråle



Snabbkopplingssats används för att kunna flytta öronspolare mellan olika rum. Genom att montera en extra snabb-koppling på ytterligare en vattenblandare kan öronspolaren lätt flyttas för användning på annan plats.



Rondskål med avlopp finns för att slippa att tömma spillvatten så ofta. Materialet är plast och den tål alla förekommande rengörings-medel samt autoklav 135°C.

Rondskålen kan även fås **utan avlopp** (förp. om 10 st).

EWACS Öronspolare, teknisk specifikation

Komplett leverans innehåller:	Regulator med manometer och kopplingar Spolpistol med snabbkopplingar (handel) Slang med snabbkopplingar (handel) Snabbkopplingssats för vattenblandare i 3 delar* Spolmunstycken, sats om 100 st Bruksanvisning
Förbrukningsmaterial:	Slang utan snabbkopplingar, standard 2 m Spolmunstycken i olika förpackningsstorlekar
Övriga tillbehör:	Strålsamlare passande till blandarens snabbkoppling Snabbkopplingssats för anslutning till annan blandare Rondskål med avlopp för spillvatten

Tekniska data:	Material:	Spolpistol Regulatorhus Slang Spolmunstycke	Acetalplast Mässing Transparent PVC HD polyeten
	Tryck	Vattenblandare (prim.) Spolmunstycke (sek.) Rek. spoltryck	max 25 bar reglerbart 0 – 3 bar 0,2 – 0,3 bar
	Vikt	Komplett Spolpistol	750 g 180 g
	Rengöring	Vanligt förekommande rengörings- och desinfektionsmedel. Spolmaskin 85 °C	

* / 2 st olika gängövergångar ingår (inv. M22 och utv. M24) passar till all moderna handfats- och diskbänksblandare. Andra gängalternativ kan levereras vid behov.

Blandare för anslutning av Ewacs Öronspolare.

För maximal temperaturstabilitet och säkerhet **rekommenderas anslutning till termostatblandare.** Vid normalfunktion fungerar även engreppsblandare bra.

Kortfattad installationsbeskrivning.

Öronspolaren ansluts till vattenblandare via en snabbkoppling som ersätter befintlig strålsamlare. Tryckregulatorn fästs i blandarens snabbkoppling och spolslang, spolpistol och spolmunstycke ansluts med snabbkopplingar. Blandaren öppnas helt och vattentemperaturen justeras. Spoltrycket ställs in med ratten på regulatorn som är justerbar i utdraget läge och ratten låses därefter. Förinställt spoltryck är ca 0,2 bar.

Se Bruksanvisning för utförligare anvisningar om installation och användning!


Medilink AB
Box 135, 711 23 Lindesberg
Tel:0581-122 33 Fax:0581-109 34
Mail: info@medilink.se
www.medilink.se